

plasma care®



Σύντομος Οδηγός

Εφαρμογή, καθαρισμός και συντήρηση
του plasma care®

Σύντομος Οδηγός

Οδηγίες βήμα προς βήμα.


1. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



Για να ξεκινήσετε, πιέστε απαλά με τον αντίχειρά σας το κουμπί αφής της συσκευής για περίπου δύο δευτερόλεπτα.

Προσοχή:

- Πιέστε το κουμπί απαλά.
- Ο αντίχειράς σας πρέπει να καλύπτει πλήρως το κουμπί αφής.

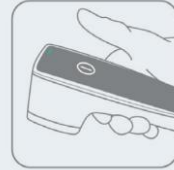

Αφαιρέστε τον αντίχειρά σας μόλις η ενδεικτική λυχνία του κουμπιού αφής γίνει λευκή..

2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΥ ΑΠΟΣΤΑΤΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ



Ανοίξτε την αποστειρωμένη συσκευασία ενός αποστάτη plasma care® **Προσοχή:**

- Μην αγγίζετε τον αποστάτη.



Συνδέστε τον αποστάτη στην συσκευή. Θα ακούσετε έναν ήχο «κλικ»

Προσοχή:

- Η γλωττίδα αφαίρεσης του αποστάτη πρέπει να βρίσκεται στο επάνω μέρος.
- Αφήστε τον αποστάτη στην συσκευασία του, κατά την τοποθέτηση του στην συσκευή, για λόγους στειρότητας.

3. ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



Η συσκευή ενεργοποιείται αυτόματα. Αυτό υποδεικνύεται από έναν ηχητικό τόνο (μπιπ) και μια μπλε ενδεικτική λυχνία που αναβοσβήνει.



Περιμένετε μέχρι η μπλε ενδεικτική λυχνία να σταματήσει να αναβοσβήνει και να ανάψει σταθερά μπλε.

4. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΤΡΑΥΜΑ



Τοποθετήστε απαλά την άκρη της συσκευής με τον αποστάτη απευθείας επάνω στην επιφάνεια του τραύματος, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ιδανικά ένας κλειστός όγκος πλάσματος μεταξύ του δέρματος και του αποστάτη.

5. ΕΝΑΡΞΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ



Ξεκινήστε τη θεραπεία αγγίζοντας απαλά το κουμπί αφής της συσκευής με τον αντίχειρά σας για περίπου 1 δευτερόλεπτο.

Προσοχή:

- Παρακαλούμε μην πατήσετε το κουμπί για περισσότερο χρόνο από τον περιγραφόμενο. Διαφορετικά, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί.
- Εάν η συσκευή απενεργοποιηθεί, ο αποστάτης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά.



Το πρώτο τμήμα της μπλε ενδεικτικής λυχνίας αρχίζει να αναβοσβήνει και ο κύκλος θεραπείας ξεκινά..

Κάθε ένα από τα τέσσερα τμήματα του δακτυλίου αναβοσβήνει για 15 δευτερόλεπτα. Ένας πλήρης κύκλος θεραπείας διαρκεί 60 δευτερόλεπτα..

6. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ



Κρατήστε τη συσκευή στη θέση της. Η λειτουργία της σταματά αυτόματα μετά από 60 δευτερόλεπτα (τέσσερα τμήματα του μπλε ενδεικτικού δακτυλίου). Εάν χρειάζεται, ξεκινήστε έναν επιπλέον κύκλο θεραπείας διάρκειας 1 λεπτού πατώντας σύντομα το κουμπί αφής.

Προσοχή: • Μην απενεργοποιείτε τη συσκευή σε περίπτωση πολλαπλής χρήσης του ίδιου αποστάτη.

Ένας αποστάτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε έναν ασθενή. Η χωρητικότητα ενός αποστάτη περιλαμβάνει 6 διαδοχικές θεραπείες διάρκειας 1 λεπτού, εντός χρονικού διαστήματος 10 λεπτών.

Προσοχή: Ο χρόνος θεραπείας ανά περιοχή τραύματος πρέπει να περιορίζεται σε 3 λεπτά (=3 κύκλοι θεραπείας).

7. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟΣΤΑΤΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



Αφαιρέστε τον αποστάτη πιέζοντας απαλά προς τα εμπρός την προεξοχή στο επάνω μέρος του .


Προσοχή: Μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε τον αποστάτη βίαια.



Απορρίψτε τον αποστάτη σύμφωνα με τις τοπικές κατευθυντήριες οδηγίες για μολυσματικά απόβλητα.

Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 90 δευτερόλεπτα. Για να την επανεκκινήσετε, δείτε το Κεφάλαιο 1 «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ».

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΜΕΓΑΛΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ

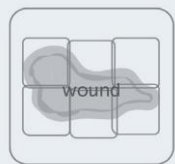


Μία θεραπεία καλύπτει επιφάνεια τραύματος 13 cm². Για έναν αποστάτη, αυτό αντιστοιχεί σε μέγιστη επιφάνεια τραύματος προς θεραπεία 78 cm² (6 x 13 cm²).

Για μεγαλύτερα τραύματα, προγραμματίστε προσεκτικά τη θεραπεία εκ των προτέρων. Πόσες περιοχές του τραύματος πρέπει να αντιμετωπιστούν και με ποια σειρά;

Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει η απαραίτητη προετοιμασία του τραύματος πριν την τοποθέτηση του αποστάτη.

Φόρτιση και τροφοδοσία ρεύματος

ΦΟΡΤΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

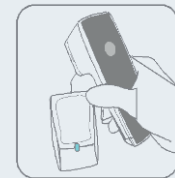

1. Συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα αφού το έχετε πρώτα συνδέσει με τη βάση φόρτισης.

2. Για να φορτίσετε τη συσκευή, τοποθετήστε την στη βάση φόρτισης, η οποία αποτελεί επίσης ιδανικό σημείο αποθήκευσής της.



Εάν το plasma care® δεν χρησιμοποιείται, θα πρέπει να φυλάσσεται στη βάση φόρτισης ώστε να διατηρείται φορτισμένο.



Προσοχή: • Δεν υπάρχει κίνδυνος υπερφόρτισης της μπαταρίας.

Η ενδεικτική λυχνία φόρτισης της μπαταρίας βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης αφής. Όταν η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη, η λυχνία είναι πράσινη. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, αναβοσβήνει εναλλάξ με κόκκινο, πράσινο και κίτρινο χρώμα.

Προσοχή: • Όταν η συσκευή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν έχει αποθηκευτεί σωστά στη βάση φόρτισης, ενδέχεται να έχει αποφορτιστεί..

Μια πλήρως αποφορτισμένη συσκευή χρειάζεται τουλάχιστον 2 ώρες φόρτισης.

Οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται τακτικά. Μετά από κάθε θεραπεία η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται επιφανειακά με απολυμαντικά μαντηλάκια. Η πηγή πλάσματος πρέπει να καθαρίζεται μόνο σε περίπτωση ορατής επιμόλυνσης. Συνιστάται ένας εντατικός καθαρισμός της συσκευής και της πηγής πλάσματος τουλάχιστον μία φορά το μήνα .

Προσοχή: • Μην χρησιμοποιείτε νερό ή υγρά σε μορφή σπρέι για τον καθαρισμό.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΗΓΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ



Πριν ξεκινήσετε την απολύμανση, αφαιρέστε την πηγή πλάσματος από τη συσκευή. Κρατήστε την πηγή πλάσματος με τα δύο δάχτυλα και περιστρέψτε την περίπου 30° αριστερόστροφα, χωρίς άσκηση δύναμης, για να την ξεκλειδώσετε.

Στη συνέχεια, τραβήξτε προσεκτικά την πηγή πλάσματος προς τα πάνω για να την αφαιρέσετε από τη συσκευή και φυλάξτε την με ασφάλεια σε επίπεδη επιφάνεια.



Το σώμα της συσκευής απολυμαίνεται επιφανειακά με απολυμαντικά μαντηλάκια. Η πίσω πλευρά και η πλευρά με το πλέγμα της πηγής πλάσματος πρέπει να ταμπονάρονται μόνο με ένα ελαφρώς υγρό πανί χωρίς χνούδι.

Μην επανασυνδέσετε την πηγή πλάσματος στη συσκευή αμέσως μετά την απολύμανση. Η πηγή πλάσματος πρέπει να στεγνώσει πλήρως, κατά προτίμηση κατά τη διάρκεια της νύχτας.



Εάν η πηγή πλάσματος δεν είναι πλήρως στεγνή, ενδέχεται να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στη συσκευή.

Γενικές Οδηγίες

Το plasma care® είναι μία ευαίσθητη ιατρική συσκευή. Παρακαλούμε ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες ώστε να διασφαλίσετε την άριστη και μακροχρόνια λειτουργία της συσκευής σας.

- Η συσκευή plasma care® είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε κραδασμούς και δεν πρέπει να πέφτει ή να εκτίθεται σε έντονες δονήσεις!

- Βεβαιωθείτε ότι ο αποστάτης αφαιρείται σωστά! (Βλέπε Κεφάλαιο 7 «ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΑΤΗ»)

- Να χρησιμοποιείτε μόνο απολυμαντικά μαντηλάκια εγκεκριμένα για τον καθαρισμό ιατρικών συσκευών. Παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε απολυμαντικά σε μορφή σπρέι.

Η πηγή πλάσματος:

- Η πηγή πλάσματος είναι η «καρδιά» της συσκευής plasma care®, όπου το πλάσμα παράγεται μέσω μικροεκκένωσης. Πρόκειται για μια λεπτή κεραμική πλάκα με ευαίσθητες ηλεκτρικές επαφές, η οποία είναι ευπαθής σε κραδασμούς και πρέπει να διατηρείται καθαρή.

- Η πηγή πλάσματος δεν πρέπει να βραχεί!

- Για να αφαιρέσετε την πηγή πλάσματος για απολύμανση ή στέγνωμα, περιστρέψτε την αριστερόστροφα χωρίς δύναμη και ανασηκώστε την. Η πηγή πλάσματος μπορεί να τοποθετηθεί και να αφαιρεθεί εύκολα, χωρίς τη χρήση δύναμης. Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα της πηγής πλάσματος και οι εγκοπές της συσκευής έχουν σωστή εφαρμογή μεταξύ τους.



Η ανάγνωση αυτού του Σύντομου Οδηγού δεν αντικαθιστά τη λεπτομερή μελέτη του εγχειριδίου οδηγιών χρήσης.

Κατασκευαστής:



terraplasma medical GmbH
Parkring 32
85748 Garching bei München

+ 49 89 588 055 30
info@terraplasma-medical.com
www.terraplasma-medical.com

Επίσημος Διανομέας στην Ελλάδα:

ΔΙΑΣΥΣ Α.Ε

ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΔΙΑΣΥΣ ΑΕ
Φειδιππίδου 13ΑΕ
Αθήνα. 11526
210 7776565
info@diasys.gr
www.diasys.gr